



Flexion Automatique



Forsco Labs
Distributeur matériel - HILL Laboratories

HILL AFT™ DROPS MANUELS

Flexion automatique motorisée

La Hill AFT est parfaite pour les chiropracteurs qui veulent la flexion automatique complète. L'AFT est étonnamment abordable pour une table qui comporte la flexion à vitesse variable, le réglage électrique de la hauteur et une liste impressionnante d'autres caractéristiques de série. L'AFT encore plus polyvalente en ajoutant plusieurs options pour la personnaliser selon vos besoins spécifiques.



Modèle en photo :
Base beige
sellerie couleur Navy


Modèle en photo:
Table AFT incluant plusieurs options

▼ FONCTIONS STANDARDS

- Flexion motorisée à vitesse variable
- Tête inclinable 30° (Tilting)
- Thoracique libéré et verrouillable
- Section pelvienne (flexion latérale et verrouillable de 0 à 21°)
- Barre de contrôle amovible pour un mouvement latéral
- Harnais de soutien des chevilles
- Barre d'accroche réglable pour le patient
- Interrupteur d'arrêt pour le patient
- Hauteur électrique contrôlée par deux pédales
- Largeur 60 cm
- Hauteur 54 cm à 74 cm (autres hauteurs disponibles)
- Mousse de la sellerie - 6.5 cm - Médium en standard (Souple ou ferme sur demande)
- Choix de 20 couleurs pour la sellerie
- Choix de 3 couleurs pour la Base de table
- Garantie d'un an pièces et main-d'œuvre



Hauteur ajustable de l'AFT de 54 à 74 cm

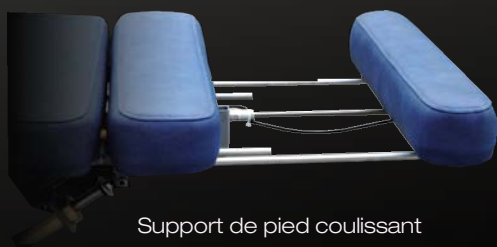

Support de pied coulissant

AFT DROPS MANUELS EN STANDARD

Toutes les fonctionnalités ci-dessous sont en standard sur l'AFT

▶ FLEXION MOTORISÉE AUTOMATIQUE

Flexion à vitesse variable.


La table HILLAIR-AFT a un panneau de commande de flexion situé au bout de la table, qui vous permet de régler la vitesse de flexion du 1 au 28 TPM (option : minuterie de 30 minutes peut également être ajoutée). Un sélecteur vous permet d'arrêter la table en position horizontale ou fléchie. Au plus bas de sa hauteur en flexion, les patients peuvent facilement monter et descendre de la table. La section du bassin de l'AFT se déplace latéralement et peut être facilement manœuvrée lors de la flexion à l'aide de la barre de contrôle. La section peut également être verrouillée latéralement de chaque côté.



Tilting



Barre de flexion latérale

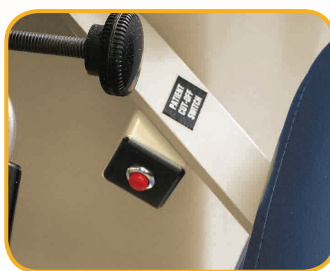

Bouton d'arrêt patient



Pédale de réglage hauteur



Thoracique libéré



Barres d'accroche patient



Contrôle de flexion

Options principales pour compléter et personnaliser votre AFT



La Flexion de la Têtière



Têtière Montante et descendante




Pack complet correction Scoliose



Minuterie



Tabourets assortis

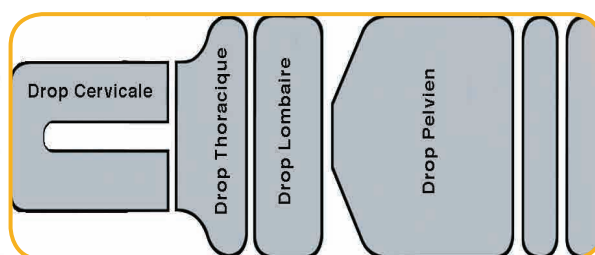

Autre options complémentaires sur www.forscolabs.fr

SPÉCIFICATIONS

AIR-AFT

- AFT - Alimentation Electrique en 220-50Volts 4.8 ampères.
- La capacité de levage - 204 kg
- Longueur : 165 cm (s'étend à 188 cm), avec le Drop Cervical : 170 à 193 cm
- Largeur : 60 cm
- Gamme de hauteur : 54 à 74 cm (autres hauteurs disponibles sur demandes)
- Sellerie de densité médium en standard (densité ferme et souple sur demande)
- Choix de 20 couleurs pour la sellerie (voir ci-dessous)
- Base télescopique en gris, beige ou noire en thermoplastique résistant au feu
- Poids à l'expédition 113 -136 kg
- Garantie d'un an pièces et main-d'œuvre

COULEURS DISPONIBLES

Couleurs de la sellerie



Couleur de la base



Le revêtement Boltaflex® avec Prefixx™, scientifiquement conçu pour donner une protection supérieure contre les taches, les éraflures est garanti anti-crevaisson. Les teintes peuvent avoir une variation entre la couleur réelle et la matière. Le choix des couleurs peuvent changer sans préavis.

Visitez www.forscoLabs.fr pour configurer votre table et faire votre devis en ligne.
Appelez un de nos collaborateurs qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

ForscoLabs
Distributeur matériel - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France • Tel: +33 145 450 301 • Fax: +33 972 447 924
contact@forscolabs.fr • www.forscoLabs.fr